

## **1 ИЗБЕГАЙТЕ СОКРАЩЕНИЙ И АББРЕВИАТУР**

Пишите максимально понятным языком и полными предложениями.

## **2 ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИМЕРЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗУБОВ**

Приводите их как ориентир для дизайнеров.  
Например, «Поставьте зуб 2.2 в моем сетапе, как зуб 1.2».  
Сделайте принтскрин или фотографию для наглядной демонстрации, какой вид вы обсуждаете.  
Принтскрины можно прикрепить к комментариям.

## **3 ПИШИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО ПУНКТАМ**

Сплошной текст воспринимается сложнее и в нем проще упустить какую-то деталь. Используйте короткие предложения. Делите текст на логические блоки.

## **4 ЧЕТКО ОПИСЫВАЙТЕ НАПРАВЛЕНИЕ И ОБЪЕМ ДВИЖЕНИЙ В ММ ИЛИ ГРАДУСАХ**

Четко указывайте какой зуб, куда и на сколько нужно переместить.  
Например, Интрузия зуба 2.2, дистализация боковой группы на 2 мм и т.д.  
Не используйте слова “немного”, “чуть-чуть” и пр.

## **5 ЗАПОЛНИТЕ ВАШИ КЛИНИЧЕСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ**

Не пишите «Сделать так же, как у доктора Иванова».  
Заполняйте клинические предпочтения максимально подробно.  
Дизайнеру необходимо понимать ваши конкретные клинические предпочтения.

## **6 ИЗБЕГАЙТЕ ОБЩИХ КОММЕНТАРИЕВ**

Комментарий “Сетап сделан неправильно” не дает полную информацию дизайнеру. Всегда уточняйте что именно по вашему мнению не так, и как это нужно изменить.  
В отсутствии нужной информации дизайнер не сможет вам помочь исправить ситуацию.

## **7 ИЗБЕГАЙТЕ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ**

Вместо «Сделать ABC контакты» пишите «Улучшить окклюзионные контакты».

## **8 НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ОЦЕНИТЬ РАБОТУ ДИЗАЙНЕРА**

Благодаря этому команда Spark сможет постоянно повышать качество вашего взаимодействия с дизайнером.